

CLINICALLY
VALIDATED# 1
Global
Bestselling
BPM Brand

All for Healthcare

M2 BASIC

TENSIOMETRU DE BRAT AUTOMAT, VALIDAT CLINIC

- ✓ Tehnologie Intellisense
- ✓ Validat clinic
- ✓ Indicator pentru nivelul tensiunii arteriale
- ✓ Simbol ghid de infasurare a mansonului
- ✓ Simbol pentru batai neregulate ale inimii
- ✓ Accesorii disponibile optional (manseta pentru brat mic, circumferinta brat 17-22 cm)
- ✓ Simbol pentru memorie

CONFORT &
ACURATEȚE

OMRON M2 Basic este un monitor digital recomandat pentru masurarea tensiunii arteriale si a pulsului la pacientii adulti.

Acest dispozitiv foloseste metoda oscilometrica de masurare a tensiunii arteriale. El detecteaza miscarea sangelui prin artera brahiala si o converteste in valori digitale pe care le afiseaza pe ecran.

Cu **OMRON M2 Basic**, puteti masura tensiunea arteriala confortabil, rapid, si precis. **M2 Basic** inglobeaza tehnologia Intellisense care elimina disconfortul umflarii peste masura a mansetei. De asemenea, poate detecta aparitia pulsului neregulat in timpul monitorizarii obisnuite a tensiunii arteriale.

Recomandari inainte de efectuarea unei masuratori

Pentru a efectua o masuratoare corecta, urmati instructiunile de mai jos:

1. Cu 30 de minute inainte de masurarea tensiunii arteriale, nu faceti baie, nu consumati alcool sau cafeina, nu fumati, nu faceti effort fizic si nu mancati. Odihniti-va cel putin 15 minute, inainte de a face masurarea.
2. Stresul determina cresterea tensiunii arteriale.
3. Masuratorile trebuie efectuate intr-un loc in care este liniste
4. Scoateti hainele care se muleaza strans pe bratul dumneavoastra
5. Stati asezat pe scaun, cu picioarele pe podea. Sprijiniti-va bratul pe o masa, astfel incat manseta pentru brat sa se afle la acelasi nivel cu inima.
6. Nu va miscati si nu vorbiti in timp ce se efectueaza masuratoarea.
7. Notati-va valorile tensiunii arteriale si pulsului pentru a le arata medicului.



- **Descrierea produsului** Tensiometru automat pentru brat
- **Categoria de produs** Sfigmomanometru electronic
- **Afisajul** Afisaj LCD digital
- **Interval de masurare presiune arteriala:** 0 - 280 mmHg
- **Intervalul de masurare a pulsului:** intre 40 si 180 batai/minut.
- **Precizie:** Tensiune: ± 3 mmHg / Puls: $\pm 5\%$ din valoarea afisata
- **Umflare:** Automata cu pompa electrica
- **Dezumflare:** Automata cu valva de eliberare a presiunii
- **Metoda de masurare:** Metoda oscilometrica
- **Clasificare IP:** Tensiometru: IP20
- **Sursa de alimentare:** 4 baterii tip „AA” de 1,5 V sau adaptor de c.a. optional (c.a. INTRARE 100 - 240 V 50 - 60 Hz 0,12 - 0,065 A)
- **Durata de viata a bateriilor:** Aproximativ 1.000 de masuratori (utilizând baterii alcaline noi)
- **Conditii de lucru:** intre $+10$ si $+40$ °C / intre 15 si 90% RH (fara condensare) / intre 800 si 1.060 hPa
- **Conditii de depozitare/transport:** intre -20 si $+60$ °C / intre 10 si 90% RH (fara condensare)
- **Protectie impotriva electrocutarii:** Echipament ME cu alimentare interna (atunci când se folosesc doar bateriile) / Echipament ME Clasa II (Adaptor optional de c.a.)
- **Greutate:** *Tensiometru:* aproximativ 250 g (fara baterii)
- **Dimensiuni** (valoare aproximativa): Tensiometru: aproximativ 112 mm (l) $\times$ 82 mm (i) $\times$ 140 mm (L)
Manseta de brat: (HEM-CR24)

